

# Gebruiksaanwijzing van de PortaSCC



Neem een melkmonster.


Mogelijkheden:

- ◇ Van een kwartier
- ◇ Een samengesteldmonster
- ◇ Een tankmelkmonster

(Let op! Het monster mag niet ouder zijn dan 8 uur.)



Codeer de strips met koenummer en eventueel kwartiernummer of andere code.

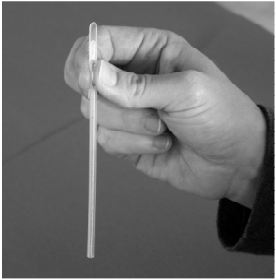

Pipet


Knijp in de bol.

Het pipet kunt u verschillende malen gebruiken, ze worden meegeleverd met de kits.




Doe de pipet in de melk.

Laat de bol los.

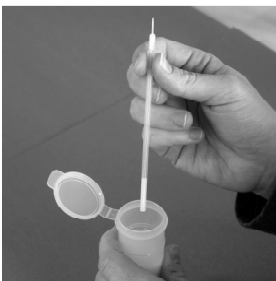

Door het loslaten van de bol onder het oppervlak zal voldoende melk opgezogen worden voor de test.

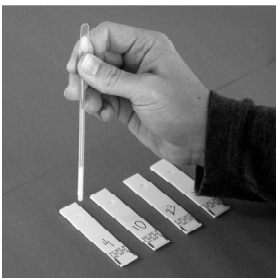

Houd het pipet boven de strip, kniip in de bol totdat 1 druppel melk op het oog van de strip valt.



Voeg 3 druppels activator vloeistof toe aan elke strip,  
direct uit het flesje  
(Nadat de druppel melk is toegevoegd)

Wacht vervolgens 45 minuten.



Reader:

Zet de reader aan,  
het getal 543 wordt weergegeven.



Doe nadat de reader is aangezet en het getal 543  
verschijnt, de blanking strip in de reader om te  
resetten.

(Let op! Oog naar beneden.)



Als de blanking strip in de reader is gedaan (oog naar  
beneden) zal in het beeldscherm een knipperend  
druppeltje verschijnen ten teken dat de reader klaar is  
voor een teststrip.



Doe de test strip 45 minuten (max 2 uur) nadat u melk  
en activator vloeistof heeft toegevoegd in de reader.



Doe de test strip met het oog naar beneden in de  
reader en lees het resultaat meteen af.

0,71 = 710.000 cellen